

OrCam READ 빠른 시작 가이드.

충전하기.

최초 사용하기 전에 3시간 이상 충분히 충전하기를 추천합니다. 이후 사용자 90~120분이면 완전히 충전할 수 있습니다. READ는 C 타입 USB 케이블을 사용하며, 제품과 함께 제공되는 OrCam 충전기를 사용하시기를 권합니다.

OrCam READ 켜기.

전원 버튼을 약 2초간 길게 누릅니다. 알람음이 들리면 버튼을 놓습니다. 전원이 켜지고 동시에 전원 표시등에 노란 불이 들어오고, 약 1분 후에 전원 표시등이 파란색으로 변합니다. 기기가 준비가 되면 “올캠 버전 [XX]가 준비되었습니다. 배터리가 [XX] 퍼센트 충전되었습니다.” 안내 멘트를 들을 수 있습니다.

텍스트 읽기.

읽을 대상의 15~35 Cm 앞에 READ를 바로 쥐고서 트리거 버튼을 누릅니다. 카메라 셔터 소리가 나고 알람음이 몇 번 들린 후 텍스트를 읽기 시작합니다. 끝까지 읽은 후 차임 소리가 울리고 읽기가 끝납니다. 트리거 버튼을 누르고 있으면 레이저 포인터(또는 레이저 상자)가 텍스트 위에 보입니다. 누른 상태로 읽고 싶은 부분을 이동하여 선택할 수 있으며, 손을 떼면 카메라가 작동합니다. (주의: 5초 이상 누르고 있으면, 동작이 취소 됩니다.)

읽기 조정.

- 일시 정지: 트리거 버튼을 짧게 2번 누릅니다.
- 다음 문장 읽기: (“+”) 볼륨 버튼을 1번 누릅니다.
- 앞 문장 읽기: (“-”) 볼륨 버튼을 1번 누릅니다.
- 멈추기: 트리거 버튼을 1번 누릅니다.
- 소리 조정: 읽기 상태가 아닐 때 (“+”) 또는 (“-”) 볼륨 버튼을 누릅니다.

레이저 포인터 조정.

레이저 포인터는 “상자형” 과 “포인터” 두가지 모드가 있습니다. 상자형은 읽고자 하는 텍스트 문단의 테두리를 지정할 수 있고, 포인터는 읽고자 하는 텍스트 시작점을 선택할 수 있습니다. 두 모드 중 하나를 선택할 때는 볼륨 버튼 (“+”)와 (“-”)를 동시에 누르면 모드를 변경할 수 있습니다.

시간 & 날짜 설정

- 시간 설정은 3가지 방법 중 하나로 변경할 수 있습니다.
- <http://www.orcam.com/timeset> 사이트에서 “OrCam READ”를 선택 후 OrCam READ로 “OrCam Please Set Zone and Time” 문장을 읽습니다.
 - 설정 메뉴에서 시간, 날짜 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
 - READ가 Wi-Fi에 연결되면 자동으로 시간과 날짜를 업데이트 합니다.

Wi-Fi 연결과 소프트웨어 업데이트

OrCam READ는 Wi-Fi를 통해 자동으로 소프트웨어를 업데이트 합니다. 인터넷에 연결하기 전에 먼저 기기가 충전기와 연결되어야 합니다. Wi-Fi는 2.4 또는 5 GHz를 지원하며, 컴퓨터 또는 스마트폰을 통해 접속 QR 코드를 받아야 합니다.



- <http://www.orcam.com/wifiset> 접속하여 내 무선 인터넷 정보 입력
- 화면의 QR코드를 OrCam READ로 읽습니다.
- 정상적으로 등록되면 네트워크 정보에 대한 안내 멘트가 나옵니다.

설정 메뉴.

OrCam READ 설정 메뉴는 음성으로 안내되며, 트리거 버튼과 볼륨 버튼으로 메뉴를 선택 또는 이동할 수 있습니다. 메인 메뉴로 이동하거나 설정 메뉴를 종료할 때는 트리거 버튼을 2번 누릅니다.

OrCam READ 끄기.

전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 한번 누르면 대기상태 안내가 나옵니다. 안내 멘트 후 전원 버튼을 한번 더 누르면 전원이 꺼집니다. 또한 전원이 켜진 상태에서 5초 이상 전원 버튼을 누르고 있으면 바로 종료할 수 있습니다. 대기상태에서 트리거 버튼을 한번 누르면 다시 사용모드로 돌아옵니다.

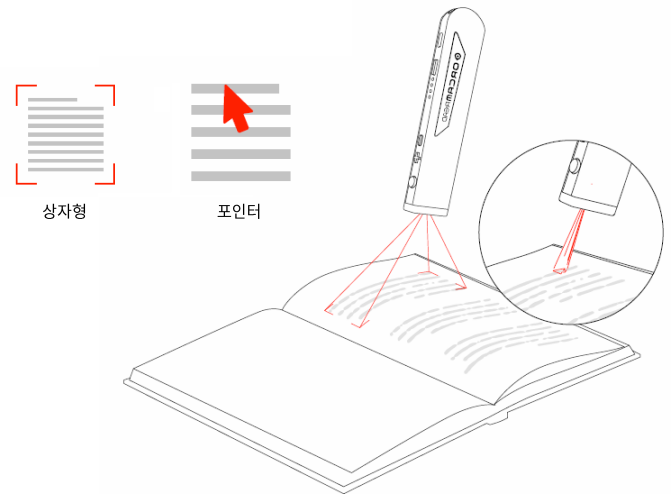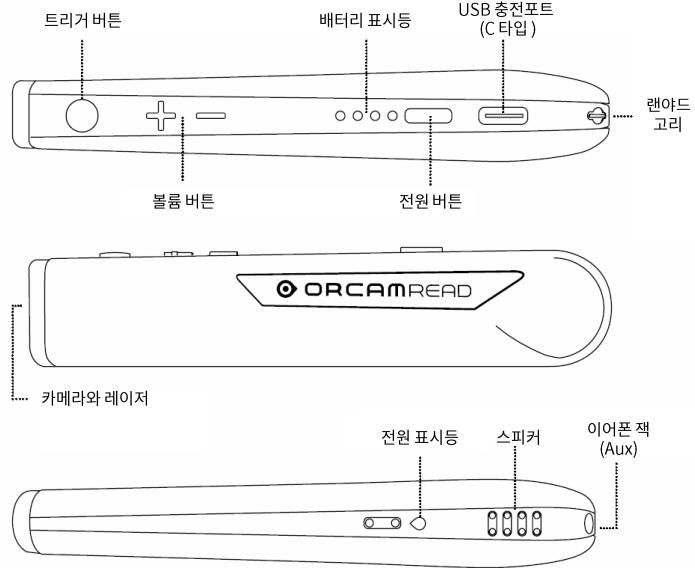

Tip

- 카메라가 텍스트 정면에 오게 들어주세요. 실행 버튼은 검지 손가락으로 누릅니다.
- 카메라 ‘찰칵’ 소리가 날 때까지 움직이지 말아주세요. 움직이면 인식률이 낮아집니다.
- 주변이 너무 어둡거나 비스듬히 사용하면 인식률이 낮아집니다.



설정 메뉴

읽기속도 메뉴 / 볼륨 메뉴 / 읽기설정메뉴 / 언어설정 메뉴 / 국가설정 메뉴 / 연결설정 메뉴 / 일반설정 메뉴